

# Weekly Dose Pack

ウイークリー・ドーズ・パック




## 使用上の注意

### <お薬のセットについて>

- 1) 服用日、用法、用量を必ずご確認のうえお薬をセットしてください。  
本製品（ペットトレイ）は凸面と凹面では用法表記が逆になりますのでお薬セット時は十分ご注意ください。
- 2) 裸錠でセットするか、ヒートシールのままでセットするかは、運用、お薬の性格等をご考慮のうえご判断ください。
- 3) ご多忙時はあらかじめ、バタフライシールのたて中央部シールをペットトレイに装着して作り置きしておくで大変便利です。
- 4) 散薬を直接ペットトレイに入れないでください。
- 5) 1回分、1日分等とカットする場合、日数分はバタフライシールの色の分かれ目に沿って、用法別の場合は格子の縦中心あたりを目安にカットしてください。  
カットした部位の孔周辺の貼付状況を確認してください。  
カットが偏った場合、孔周辺の接着が不十分な場合がありますのでご注意ください。  
切れの悪いはさみ等ご使用になるとペットトレイが波打つことがありバタフライシールの接着が悪くなる場合があります。
- 6) 患者属性、用法、用量が記載しにくい場合はペットトレイ凸部に日常お使いの高さ2センチ以上のトレイ等をかぶせてお使い頂くことをお勧めします。
- 7) 本製品は分包紙同様未滅菌です。
- 8) バタフライシールへの日付記載は、貼付する前におこなうと便利です。
- 9) 吸湿性のあるお薬はセットしないでください。
- 10) 散薬等については弊社推奨のファイル管理をお使いいただくと一括管理が容易になります。
- 11) 使い方によっては、ウイークリー・ドーズ・パックもリフィル（お替り）可能です。  
またファイル管理ポケットはすべてリフィル（お替り）用です。

# Weekly Dose Pack

ウィークリー・ドーズ・パック

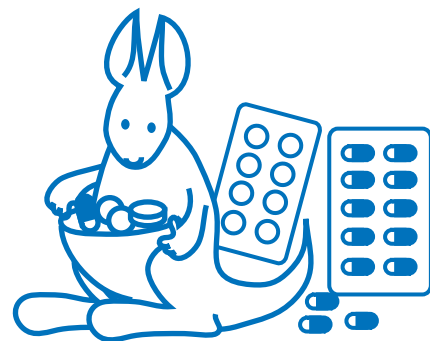

## 使用上の注意

### <服用について>

- 1) 服用日、用法、用量を必ずご確認のうえ、お薬を服用してください。
- 2) 本製品（ペットトレ）は凸面と凹面では用法表記が逆になりますのでお薬服用時は十分ご注意ください。
- 3) 開封時、押し出す時はゆっくり押し出してください。早く押すと錠剤等が孔から飛び出す原因ともなります。  
また開封しにくい場合は、バタフライシール面からシールを押して開封してください。やさしい開封方法のこつはホームページに掲載しています。または、弊社までお問い合わせください。
- 4) 服用後はミシン目に沿って服用開口部を切り取ってください。

### <保管方法>

高温、多湿、日光の直接あたる環境等には保管せず、従来のお薬保管方法と同様に保管ください。また飲み残しのお薬を、長期間放置しないでください。  
お薬セット時、そのお薬は使用期限を厳守してください。



ツインライフ株式会社

〒214-0031 神奈川県川崎市多摩区東生田1-10-3-107  
TEL: 044-900-0183 FAX: 044-900-1492

E-mail: wdp@twin-life.com

www.twin-life.com